

1 Antes de realizar la prueba, haga enjuagues con agua durante 10 segundos.



2 Una vez limpia, no puede comer, beber, fumar, cepillarse los dientes o usar colutorio bucal hasta que se tome la muestra.



3 Lavarse las manos antes de manipular el Kit de toma de muestra.



4 Extraer del blíster el tubo y el embudo.



5 Destapar el tubo y acoplar el embudo en el mismo.



6 Deposite la saliva en el tubo a través del embudo (NO ESCUPIR). Evite toser durante la recogida de la muestra.




Recoja un mínimo de 1 ml de saliva (1/3 del tubo de muestra).

7 Quitar el embudo y taponar el tubo con el tapón de rosca. Asegúrese de que el tubo está correctamente cerrado.



8 Etiquete el tubo con una de las pegatinas de código de barras identificativa.

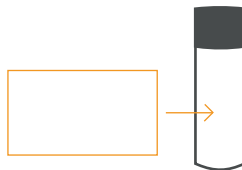

9 Introduzca el tubo etiquetado en la bolsa que acompaña al kit.

